

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующих средств компании DURR Dental, Германия

Название	Для чего	Как приготовить	Время обработки	Сколько хранить	Как хранить
Концентрат для дезинфекции инструментов “ID 212”	Подходит для очистки общего, хирургического и вращающегося инструментария	2% рабочий раствор - 20 мл концентрата на 1 л. воды; 4% рабочего раствора - 40 мл. концентрата на 1 л. воды.	Дезинфицирование инструментов – 2% р.р. - 5 мин; Бактерии и грибы – 2% р.р - 5 мин; Тб бактерии – 2% - 60 мин; Vaccinia вирусы вкл. HBV, HCV, HIV - 2% р.р. - 1 мин; Ного вирусы – 4% р.р. - 60 мин.	Рабочий раствор не более 7 суток и/или в зависимости от уровня загрязнения	В прохладном месте при температуре не ниже + 5°C
Готовый к употреблению раствор для дезинфекции боров “ID 220”	Исключительная очищающая способность для тонкой структуры боров и фрез, высокая устойчивость к коррозии	Готовый к применению раствор	Дезинфекция инструментов в течении 1 минуты. Для дезактивации оболочковых и безоболочковых вирусов - 1 минута. Это включает дезактивацию гепатита вируса В, гепатита вируса С и ВИЧ	Рабочий раствор не более 7 суток и/или в зависимости от уровня загрязнения	В прохладном месте при температуре не ниже + 5°C
Концентрат для дезинфекции поверхностей “FD 312”	Дезинфекция поверхностей и предметов, проверенная совместимость с материалами, чрезвычайно приятный аромат	1%- рабочий раствор - 80 мл. концентрата препарата на 8 л воды. 2%- рабочий раствор - 160 мл. концентрата на 8 л. воды.	Для дезинфекции поверхностей: 1% р.р. - времени воздействия 15 мин.; 2% р.р. - 5 минут.	Рабочие растворы готовить ежедневно!	В прохладном месте при температуре не ниже + 5°C
«OROTOL PLUS» для дезинфицирования аспирационных систем	Предназначенный для одновременного дезинфицирования, очистки и дезодорирования стоматологических аспирационных систем, плевательниц и амальгамосепараторов.	2% рабочий раствор - 20 мл. концентрата на 1 л. воды.	Дезинфекция отсасывающих систем– 2% р.р. - 60 мин; Бактерии и грибы – 2% р.р - 5 мин; Микобактерии туберкулеза– 2% - 60 мин; Vaccinia вирусы вкл. HBV, HCV, HIV - 2% р.р. - 10 мин; Ного вирусы – 2% р.р. - 15 мин. Adeno вирусы - 2% р.р. – 30 мин.	24 часа! Перед каждым применением разводить заново.	В прохладном месте при температуре не ниже + 5°C