

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующих средств компании DURR Dental, Германия

Название	Для чего	Как приготовить	Время обработки	Сколько хранить	Как хранить
Концентрат для дезинфекции инструментов <b>“ID 212”</b>	Подходит для очистки общего, хирургического и вращающегося инструментария	2% рабочий раствор - 20 мл концентрата на 1 л. воды;  4% рабочего раствора - 40 мл. концентрата на 1 л. воды.	Дезинфицирование инструментов – 2% р.р. - 5 мин;  Бактерии и грибы – 2% р.р - 5 мин;  Тб бактерии – 2% - 60 мин;  Vaccinia вирусы вкл. HBV, HCV, HIV - 2% р.р. - 1 мин;  Ного вирусы – 4% р.р. - 60 мин.	Рабочий раствор не более 7 суток и/или в зависимости от уровня загрязнения	В прохладном месте при температуре не ниже + 5°C
Готовый к употреблению раствор для дезинфекции боров <b>“ID 220”</b>	Исключительная очищающая способность для тонкой структуры боров и фрез, высокая устойчивость к коррозии	Готовый к применению раствор	Дезинфекция инструментов в течении 1 минуты.  Для дезактивации оболочковых и безоболочковых вирусов - 1 минута.  Это включает дезактивацию гепатита вируса В, гепатита вируса С и ВИЧ	Рабочий раствор не более 7 суток и/или в зависимости от уровня загрязнения	В прохладном месте при температуре не ниже + 5°C
Концентрат для дезинфекции поверхностей <b>“FD 312”</b>	Дезинфекция поверхностей и предметов, проверенная совместимость с материалами, чрезвычайно приятный аромат	1%- рабочий раствор - 80 мл. концентрата препарата на 8 л воды.  2%- рабочий раствор - 160 мл. концентрата на 8 л. воды.	Для дезинфекции поверхностей:  1% р.р. - времени воздействия 15 мин.;  2% р.р. - 5 минут.	Рабочие растворы готовить ежедневно!	В прохладном месте при температуре не ниже + 5°C
<b>«OROTOL PLUS»</b> для дезинфицирования аспирационных систем	Предназначенный для одновременного дезинфицирования, очистки и дезодорирования стоматологических аспирационных систем, плевательниц и амальгамосепараторов.	2% рабочий раствор - 20 мл. концентрата на 1 л. воды.	Дезинфекция отсасывающих систем– 2% р.р. - 60 мин;  Бактерии и грибы – 2% р.р - 5 мин;  Микобактерии туберкулеза– 2% - 60 мин;  Vaccinia вирусы вкл. HBV, HCV, HIV - 2% р.р. - 10 мин;  Ного вирусы – 2% р.р. - 15 мин.  Adeno вирусы - 2% р.р. – 30 мин.	24 часа! Перед каждым применением разводить заново.	В прохладном месте при температуре не ниже + 5°C