



## ИНСТРУКЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ


Перед смешиванием дайте содержимому обоих шприцев нагреться до комнатной температуры. Прежде чем продолжать процедуру, убедитесь в том, что красный и прозрачный шприцы надежно соединены друг с другом.

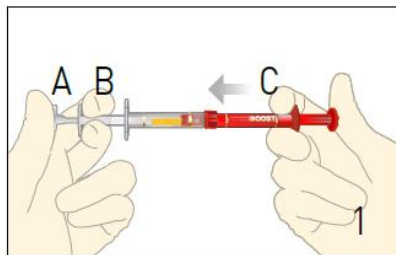


1. Прежде чем продолжать процедуру, убедитесь в том, что оба шприца надежно соединены друг с другом. Втолкнув плунжер красного шприца (C), выдавите все содержимое в прозрачный шприц (B).

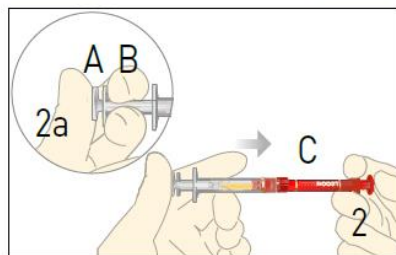

2. Вталкивайте малый прозрачный стержень (A) в прозрачный плунжер (B). См. завершённый шаг на рис. 2а. Затем полностью вдавите прозрачный плунжер (A/B) в красный шприц (C).

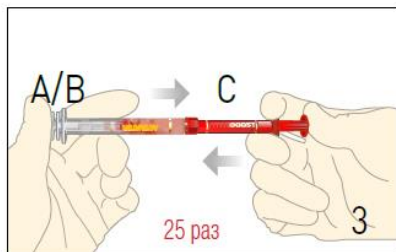

3. Чтобы активировать препарат, надавливайте на шприцы большими пальцами, быстро прокачивая содержимое из одного шприца в другой минимум 25 раз (по 12-13 раз в каждом направлении / с каждой стороны). Выдавите весь смешанный материал в красный шприц.

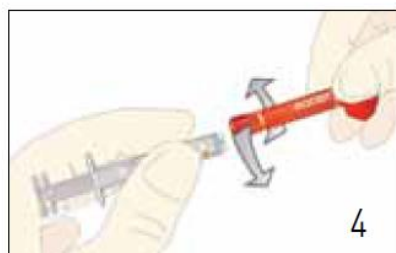

4. Отсоедините прозрачный шприц и выбросьте его.



5. Накрутите насадку Micro 20 ga FX Tip на красный шприц. Перед использованием препарата в полости рта проверьте степень его растекания на ватном валике или блоке для замешивания, чтобы обеспечить равномерную подачу препарата. Если вы ощущаете какое-либо сопротивление, НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ работу. Прикрепите новую насадку и повторно выполните испытание материала, прежде чем наносить его.

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** После смешивания срок хранения Opalescence Boost составляет 10 дней при условии его хранения в холоде. После 10 дней утилизируйте его, поскольку в шприце может создаться давление. Материал необходимо разбавить водой и вылить в раковину или унитаз, а затем смыть его несколькими литрами/квартами воды. НЕ утилизируйте вместе с мусором, который содержит воспламеняемые отходы, например, бумагу, картон, резину, кожу, вату и т. д., так как может произойти возгорание. Также нельзя, чтобы сильная перекись водорода во время применения вступала в контакт с воспламеняемыми материалами, иначе может произойти возгорание.

**Предупреждение:** пациент и медперсонал должны использовать защиту для глаз во время смешивания, нанесения и удаления препарата Opalescence Boost. Перекись водорода может вызвать ожоги мягких тканей (напр., кожи, десны, губ). Наносите препарат только на обрабатываемую поверхность, изолируя соседние участки.